

活動量計 機器登録手順

新しい活動量計をご使用の際は、以下の手順に従って、「**HealthPlanet（ヘルスプラネット）**」WEB版での機器登録が必要となります。
※パソコンで登録する場合は、3 から進めてください。

- 1** ホーム画面右上の「プロフィール」アイコンをタップします。



- 2** プロフィール画面を下にスクロールして「ヘルスプラネット」WEB版をみる」をタップします。



- 3** 「ヘルスプラネット」WEB版に遷移したら、画面右上の「ログイン」をタップ。ご自身の「ID」「パスワード」を入力したら「ログインする」をタップします。




- 4** ログイン後の画面右上の「登録情報」をタップします。



- 5** 登録情報の確認・変更画面が表示されたら「測定機器登録」をタップします。



- 6** 「機器を登録する」をタップします。

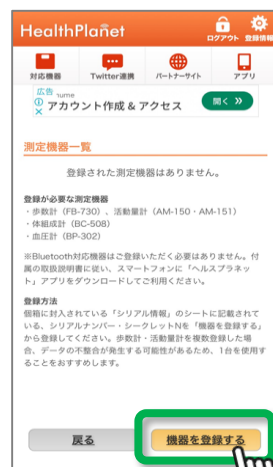

- 7** 画面に表示される案内に従って、活動量計のシリアル情報を入力し、内容を確認後に、登録を行ってください。



活動量計の製品箱に入っている黄色い紙に記載されている「シリアルナンバー(MYH S/N)」と「シークレットナンバー(シークレットN)」を入力してください。



※機器登録後はデータ送信を行い、「FFFFF」状態を解除する。